


REMEDIC

Duschstuhl - Badewannenhocker



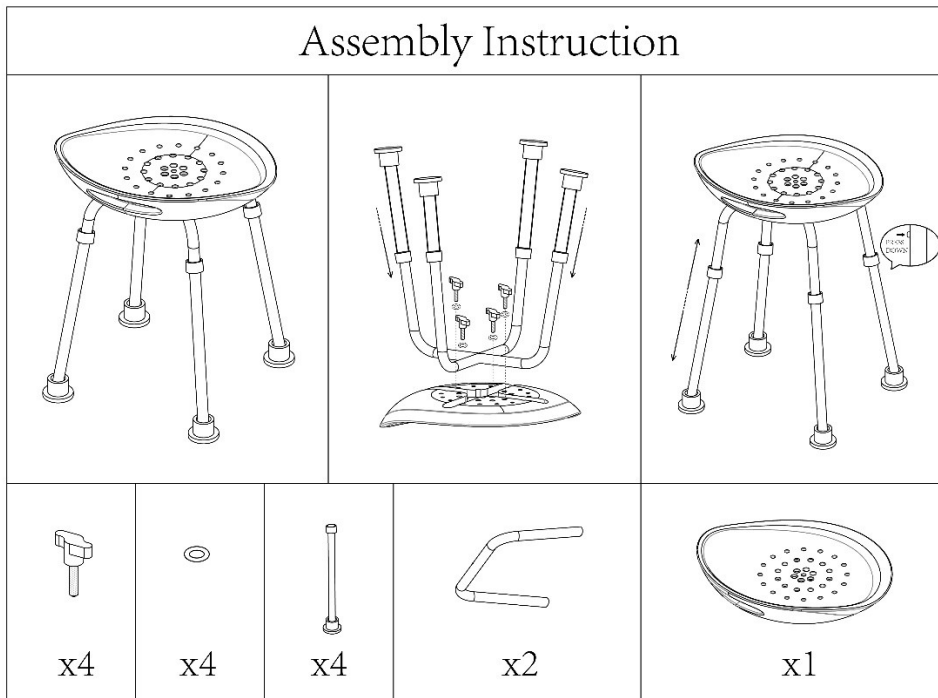



Maximales Benutzergewicht 150 kg / 300 lbs

Verwenden Sie den Hocker sicher – Verwenden Sie ihn nur auf ebenen, rutschfesten Oberflächen

Vor dem ersten Gebrauch

Bevor Sie den Duschhocker verwenden oder aufstellen, vergewissern Sie sich bitte, dass dieser vollständig und unbeschädigt ist. Stellen Sie sicher, dass alle Halteklammern zur Höhenverstellung richtig eingerastet sind. Verwenden Sie den Duschhocker nicht, wenn eine der Halteklammern nicht richtig einrastet

.

Anleitung zum Zusammenbau

- Legen Sie die Sitzfläche verkehrt herum auf eine ebene Fläche.
- Legen Sie die Rahmenteile mittig so übereinander, dass die Aussparungen einrasten und fixieren Sie beide Teile mit der Schraube in der Mitte.
- Fixieren Sie nun die Rahmenteile mit den restlichen vier Schrauben.
- Jetzt, Setzen Sie die vier Beine so ein, dass die Bohrungen aller Beine zur Innenfläche des Hockers zeigen, und achten Sie darauf, dass die gefederten Stifte richtig einrasten. Bitte stellen Sie alle Beine auf die gleiche Länge ein.

Pflege und Wartung

Dieser Duschhocker erfordert keine besondere Wartung. Es kann mit jedem handelsüblichen Reinigungsmittel gereinigt werden. Prüfen Sie in regelmässigen Intervallen ob die Schrauben richtig festgezogen sind.

Desinfektion

Dieser Duschhocker kann mit jedem handelsüblichen Desinfektionsmittel, das für die Verwendung mit Kunststoffmaterialien geeignet ist, desinfiziert werden.

Wichtig

Befolgen Sie bei der Verwendung von Desinfektionsmitteln die Anweisungen des Herstellers.

Notiz

Änderungen oder Reparaturen am Duschhocker dürfen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal und nur unter Verwendung von Original-Ersatzteilen durchgeführt werden.

Änderungen vorbehalten.